

フェイスシールドの取り扱いについて

本品は、飛沫のガード及び自身の飛沫拡散の低減を目的としたフェイスシールドです。

装着について

◎安全にお使い頂くためには、顔全体を覆う位置でヘッドバンドを頭部に装着して、適正な強さで固定してください。

◎本品は、ウィルスや花粉を完全に遮断できるものではありません。

◎使用上とがった部分等がございますので、ケガをしないようご注意ください。

◎フェイスシールド脱着時、手で触るところは最低限にし、素手ではなく使い捨て手袋をご使用下さい。

◎繰り返し使用は可能ですが、装着の際は必ず細部の劣化確認の上ご使用下さい。

お手入れについて

◎使用後はアルコールまたは次亜塩素酸水、ハイターを薄めたもので消毒したのち完全に乾燥させてから再度ご使用下さい。

◎お子様がシールドの外側の面を触らないようご注意ください。

ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂の特徴

耐熱性： フィルムなどで使用する場合は耐熱性に優れている。

耐寒性： -60℃ほどまで耐寒性を持つ。

透明性： ペットボトルでも使用されているとおり、透明性に優れている。

耐薬品性： 無延伸フィルムなどで使用する場合は耐薬品性に優れる。

耐水性： 耐水性に優れ水を通さない。

皆様のご安全を祈り一日も早い新型コロナウイルスの収束を願っております。

三伸樹脂工業株式会社
石川県羽咋市千里浜町ソ7番地
TEL0767-22-0257
FAX0767-22-2134
<http://www.s-regin.com>
E-mail sansin@diary.ocn.ne.jp

